

Dokumentansvarlig:	Idun Alvestad Sundquist	Dok. id:	PR30995
Godkjent av:	Michael Strehle	Versjonsnummer:	2.1
Gyldighetsområde:	Finnmarkssykehuset HF	Neste rev. dato:	20.06.2026

1.0 RUTINENS HENSIKT:

Illustrasjon av tilkobling av transfusjonssett.

2.0 OMFANG:

Gjelder alle som utfører transfusjon.

3.0 GRUNNLAGSINFORMASJON:

Kopi av PR17100 ved Nordlandssykehuset HF/Immunologi og transfusjonsmedisin etter avtale med Grethe Brobakk.

4.0 ARBEIDSBESKRIVELSE:



1. Legg blodposen på flatt underlag. Steng rulleklemma. Åpne plastflikene på blodposen og stikk spissen forsiktig inn i poseåpningen. Hold settet opp og åpne rulleklemma. Klem på posen slik at blodet fyller filteret og halvparten av dråpekammeret.



2. Steng rulleklemma og heng opp blodposen.



3. Åpne rulleklemma og la blodet renne kontrollert helt med til enden av slangen. La det kommer et par bloddråper ut, og steng så rulleklemma. Det er nå klart til å koble transfusjonssettet til pasientens venekanyle.